

クリップエイド™ (蛇管用)

ClipAid™ for Corrugated tubes






商品コード	JANコード(14)	商品名	チューブ径	包装
9022	14562127610836	クリップエイド 15	φ15mm	3 個/箱
9023	14562127610843	クリップエイド 22	φ22mm	3 個/箱

Amazon.co.jp にて好評販売中


■ 使い方

(トレーナーくらいの厚さまでの布地に使えます)


1 左右の突起を押してホルダーを開きます。 2 ボタンを取り出します。

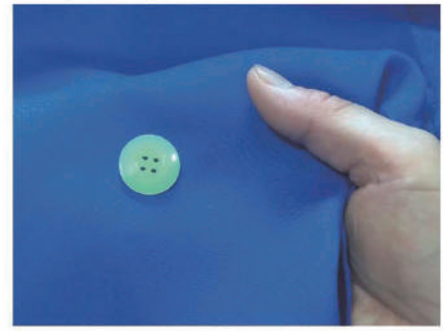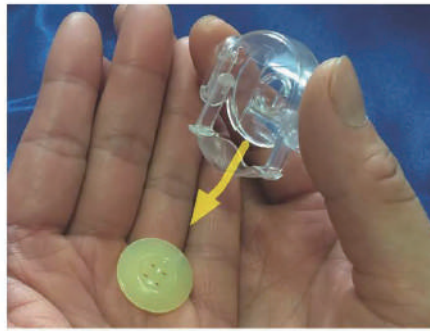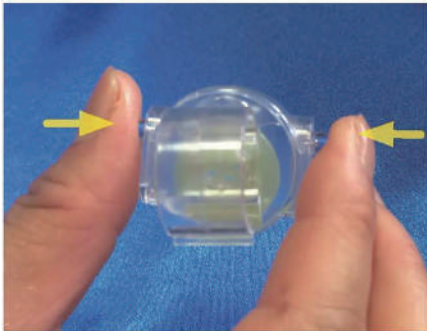

4 布地の上からホルダーをかぶせます。

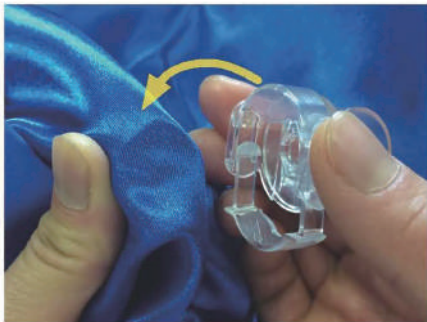


5 ホルダーのスライダーを強く押します。

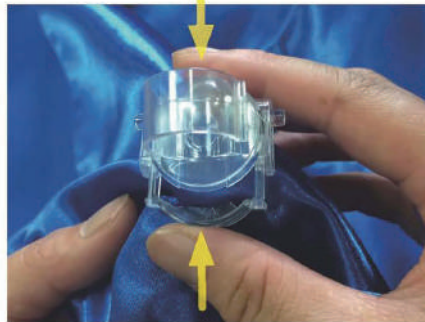

6 「カチッ」とロックするまで押し込みます。



7 蛇管をクリップに差し込みます。

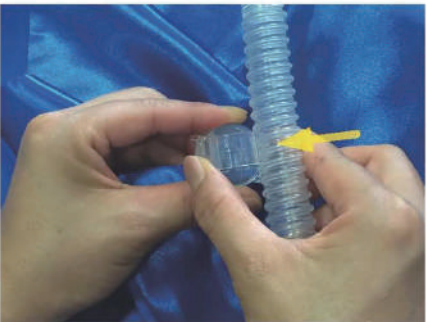

8 完全にはめ込みます。



9 セット完了。



■ **ご注意** 小さなお子様にご使用になる場合は、誤嚥防止の為
固定ボタンを縫い付けてご使用下さい。



泉工医科工業株式会社

113-0034 東京都文京区湯島 3-20-7 泉工医科工業株式会社 第三別館 2F
商品企画 麻酔 お問い合わせ専用メールアドレス: Clip@mera.co.jp