

7001/7002

【PORETECメンブレンフィルター】



7003

【PORETECホワイトスライドガラス】



7004

【PORETECカバーガラス】



7005

【PORETECスペーサー】



7006

【PORETECギムザ染色用パック剤】



7007

【PORETEC封入剤】



7008

【PORETECフィルター取り出し治具】



7010


【PORETEC集細胞ホルダー】

- * 初期投資が低価格で集細胞出来ます！
- * 手技でろ過できるので細胞形状が変形しにくい！
- * ホワイトスライドガラス使用により鏡顕時に
フィルターのポアがほぼ見えなくなり、細胞が見えやすくなります。
- * ポア径の特注も承ります！

□特長


- 微量検体でも確実に集細胞することができます。
- 遠心分離器などの器械を使用しませんので細胞の変形・変性が生じません。
- 熟練を必要としないので作業の標準化が可能です。
- 集細胞が簡単にでき直接フィルターのままプレパラートにできます。
- フィルター上から細胞の剥離がありませんので精度が向上します。
- アルコール系以外の固定液も使用できます。
- 従来の染色方法が全て可能です。

■主な用途 細胞診：擦過細胞、穿刺細胞、尿、髄液、腹水、その他各種検体検査、培養等

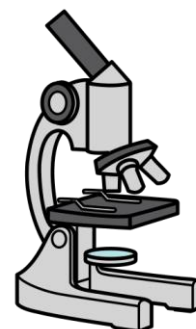


品 番	品名/規格	入数	価格
7001	メンブレンフィルター/普通型	1セット(100枚)	¥26,000
7002	メンブレンフィルター/剥離型	1セット(100枚)	¥26,000
7003	ホワイトスライドガラス	1セット(100枚)	¥19,000
7004	カバーガラス	1セット(100枚)	¥1,500
7005	スペーサー	1セット(100枚)	¥5,780

品 番	品名/規格	入数	価格
7006	ギムザ染色用パック	1セット(30g)	¥1,150
7007	封入剤	1セット(100ml)	¥2,000
7008	フィルター取り出し治具/磁石式	1枚	¥800
7010	集細胞ホルダー	1個	¥12,000

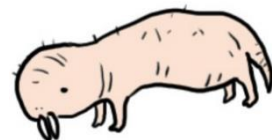

①ホルダー下部のストッパーを抜き

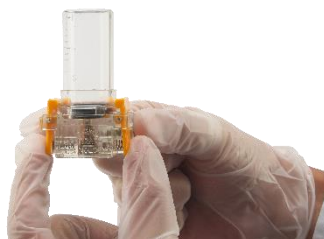

②レバーをつまみながら
円筒キャップを外します



③SUS枠(金属面)が上になるよう
ピンセットでスペーサー上に
乗せます



④レバーをつまみ円筒キャップを
フィルター上にセットし



⑤円筒キャップ下部にレバー先端が
キャッチしているか確認し
ストッパーを差込みます。



⑥今一度レバーが円筒キャップ
下部をしっかりとキャッチして
いるか確認します




⑦円筒キャップの上から検体を
注入します。(裏面※1参照)



⑧シリンジの先端を吸引口に押し込み
ゆっくり吸引して下さい
吸引口は底にもあります。
検体をこぼさないよう注意して下さい。



⑨ ①②の順で円筒キャップを
外し

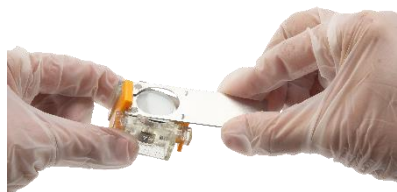


⑩フィルター取り出し治具で
フィルターを取り出します。
SUS枠に磁石がつきます。




⑪95%エタノールにて固定後
(裏面※2参照)



⑫フィルター取り出し治具がついた
状態で染色します。
スライドガラス立を使用できます。

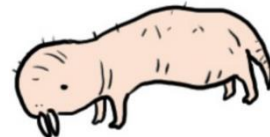

フィルターを剥さず封入する場合 (普通型)

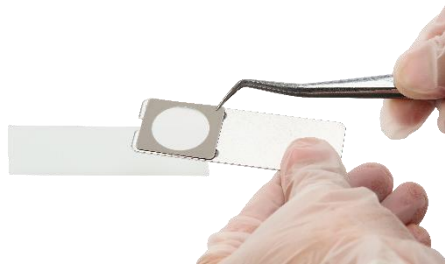

①染色終了後印刷面が上の状態のホワイтスライドガラス中心にキシレンを微量滴下しSUS枠が上の状態でフィルターを乗せます



②フィルター中心にガラス棒等で封入剤を1～2滴 滴下します。その上にカバーガラスを乗せ軽く押してください。



③封入剤が十分にフィルター全体に拡散したのち鏡検して下さい。

フィルターを剥して封入する場合 (剥離型)



①染色終了後印刷面が上の状態のホワイтスライドガラス中心にキシレンを微量滴下しSUS枠からフィルターを剥し乗せます




②フィルター中心にガラス棒等で封入剤を1～2滴 滴下します。その上に四角いカバーガラス (他社製品) を乗せ軽く押してください。



③封入剤が十分にフィルター全体に拡散したのち鏡検して下さい。

補足説明

- ※1 細胞量が多い場合はホルダーに入れた検体を20mlの生理食塩水アンプル (または乳酸リンゲル液) で薄めて下さい。シリンジにて陰圧をかけているときに抵抗を感じたら集細胞ホルダーに残っている検体を試験管に移し、再度フィルターにて濾過して下さい。
- ※2 膨化を防ぐため濾過したらすぐにエタノール95%に浸し、その後細胞がついているかを目視で見てください。再度エタノール95%に5～10分浸し、その後両面15cm程距離を置きスプレー固定して下さい。
- ※3 集細胞ホルダーの洗浄はステンレスが腐食しない消毒液を使用して下さい。濾過液の通過する経路はシリンジ等で消毒液を満たして血液成分を消毒し、すすいで下さい。パッキンに劣化が見られた場合は付属のものと交換して下さい。スプレーは単回使用を推奨致します。

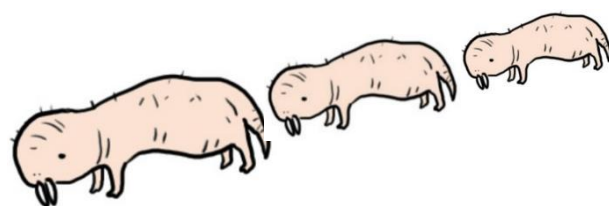

センシンメディカル株式会社

SENSHIN 〒113-0034 東京都文京区湯島2-7-16 プリ・テックビル6F TEL:03-5802-0560 FAX:03-5802-0562 URL:<http://www.senshin-medical.co.jp/>