



Disposable Splash Guard

[ディスポーザブル スプラッシュガード]

COVID19感染症対策製品

特許出願中



最前線で戦う医療従事者を感染症から守る

ディスポーザブル スプラッシュガードには、医療現場で求められていた要件が反映され、
オペ室、ICUでの施術、麻酔科医の挿管、抜管時などで
医療従事者をCOVID19や結核などの感染症から守ります。


01 畳んでメディカルペール※
に捨てられる ※医療用ゴミ箱

 **Disposable Splash Guard**
[ディスポーザブル スプラッシュガード]

使用時に組み立てるので
保管場所をとらない 02



使い捨て可能だから
医療現場の衛生を保てる

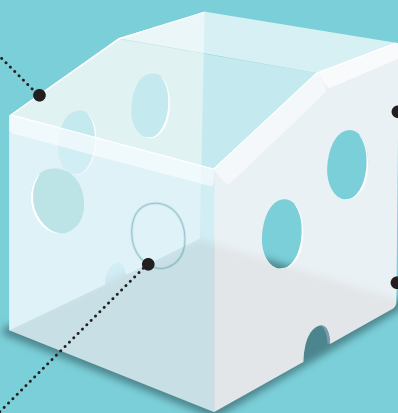

コンパクトに包装されており
重ねて保管できる

03 用途に合わせて
対応できる開口部

軽くて扱いやすく
組み立てが簡単 04



必要な開口部を抜いて使用
※使用しない場合は閉じておく

折り目の入ったPET材と
ダンボールプラスチック





医療現場にフィットする 扱いやすい素材とサイズ感


 Disposable Splash Guard

[ディスポーザブル スプラッシュガード]

製品仕様

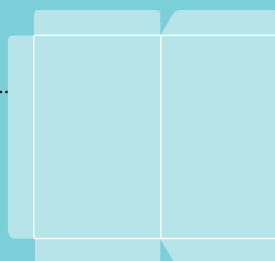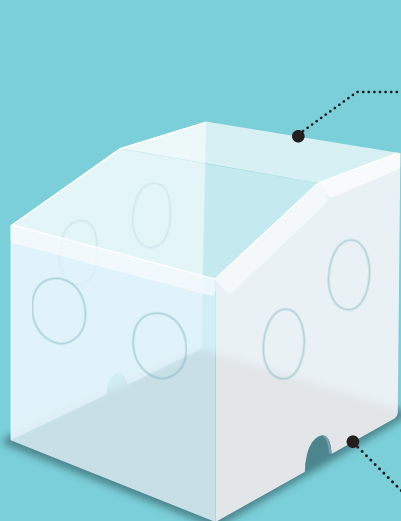

【 上面展開図 】

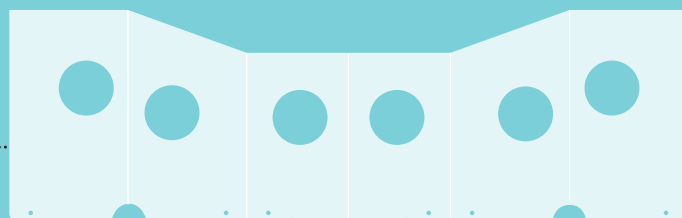

【 側面展開図 】

サイズ: H470×W500×D550*

原材料: ダンボールプラスチック/PET材

包装材の材質: ポリエチレン


生産国: 日本

セット内容: 本体/取扱説明書


*サイズは変更になる場合がございます。

組み立て方


1 折りたたまれた側面を
展開する

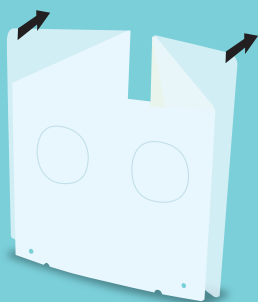

2 側面のシールを剥がし
上面PET材を接着

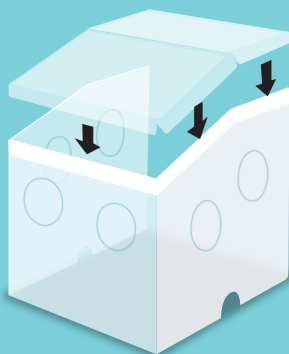

3 必要に応じて
開口部を抜き取り完成

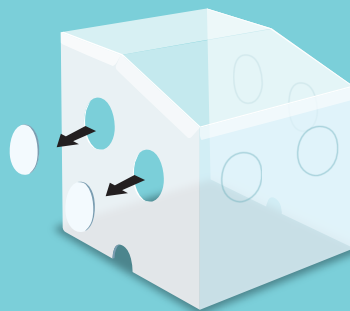

【 販売代理店 】

 センシンメディカル株式会社
SENSHIN

〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-13
TEL:03-5802-0560 FAX:03-5802-0562
<https://www.senshin-medical.co.jp/>



【 製造元・販売元 】

 協栄プリント技研株式会社

〒182-0025 東京都調布市多摩川1-21-1
TEL: 042-484-2151 FAX: 042-488-1870
Mail: kpg@kpg.jp <https://www.kpg.jp>

