

ニューボイス

Made in USA ニューボイス社製



電動式人工喉頭 · 発声補助具

喉頭全摘出術を受けた方 気管切開術を受けた方 何らかの理由で発声が困難な方

ニューボイスⅡ

発声ボタン 音量調整ボタン トーン調整ボタン

簡単操作2タイプ

お好みに合わせて お選びください。 発声音はどちらも 同じです。

音量調整ボタンを押しながら発声ボタンを押すと音量が徐々に上がります。 お好きな音量で手を離せばセット完了。 バッグやポケットに入れてもずれにくい設計です。

i	商品コード	A302000
	サイズ	直径34mm 長さ112mm 重量87g(電池除く)
	トーン調整	トーン調整ボタンを先の細い物 でやさしく押しながら発声ボタ ンを押して調整

ニューボイス I



音量調整はダイヤル式。 使用するシーンに合わせて簡単に 音量を調整できます。

商品コード	A302001
サイズ	直径34mm 長さ107mm 重量90g(電池除く)
トーン調整	発声ボタンを押しながらトーン 調整ダイヤルに付属のドライ バーを差し込んで調整

ニューボイスの特長

軽量、コンパクト

・本体は耐久性のあるポリカーボネート製

- ・パワフル音量
- · 充電式電池、予備付



ニューボイスⅢ

2つの発声ボタンがあり、それぞれ のボタンに音量をセットできます。 シーンによって使いわけできます。



発声方法



- ①ノーズキャップ(本体上部の白い部分)をあご下部や首周辺に、皮膚に対 して直角に軽く押しつけます。
- ②口で大きく「あ」の形を作って発声ボタンを押します。
- ③よく響く明瞭な「あ」の音が出れば、その場所を覚えておいてください。
- ④ 明瞭な音が出なければ、押しつける場所を少しづつずらしながら、一番 よく聞こえる場所を探してください。
- ⑤鏡を見ながら行うことをおすすめします。
- ⑥ どの場所が最もよく聞こえるかは個人差があります。

02 発声の練習・習得

本品の習得には練習が必要です。習得の度合いには個人差があります。

本品の使用は耳鼻咽喉科医・言語聴覚士、または日本全国に拠点を置く発声教室で指導を受けられ ることを前提としています。各地の発声教室の情報は「特定非営利活動法人 日本喉摘者団体連合 会」(〒105-0004東京都港区新橋5-7-13ビュロー新橋901 TEL:03-3436-1820 FAX:03-3436-3497) にお問合せください。

03 試用機の貸出し

ご購入を検討されている方へ試用機の貸出し を行っております。

貸出し期間は2週間で費用は無料です。(返却 送料のみご負担ください。)

メールまたはFAXでお申込みください。

05 日常生活用具給付対象

電動式人工喉頭「ニューボイス」は、日常生 活用具給付対象商品です。

給付を受けられる条件、手続き方法、給付額 等は地方自治体によって異なりますので、詳 しくは、お住まいの市区町村役場の福祉窓口 へお問合せください。

04 アフターサービス

ご購入から7年間修理対応いたします。

※5年以内は無償修理(一般的な使用状況下 での故障に限ります。)

※5年超~7年は有償修理

※付属の充電池と充電器は保証対象外

修理期間中は代替機を貸出します。

06 セットの内容

体: 1台 専用充電器: 1個

充 電 池:2個(6P型)

※市販のアルカリ電池(絶縁リングのないタ イプ)でも使用できます。

(ホームページ)



販売店

お問合せ

TEL 0120-731008 (フリーダイヤル)

FAX 03-5802-0562

MAIL ss_reception@senshin-medical.co.jp

販売元



(で センシンメディカル株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目7番16号